



Comment utiliser un thermomètre médical infrarouge*


*Les instructions peuvent varier selon le modèle de thermomètre

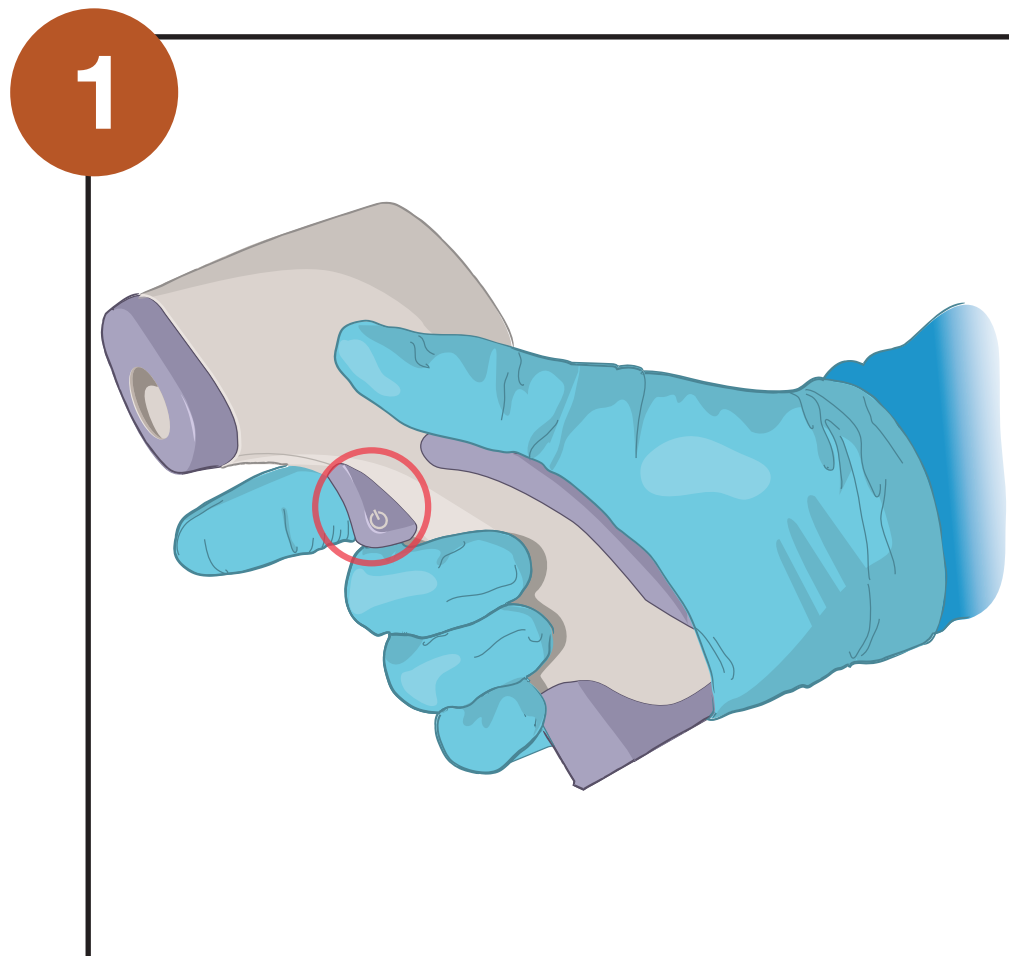



1. Appuyez sur le bouton « Marche/arrêt » pour allumer le thermomètre.

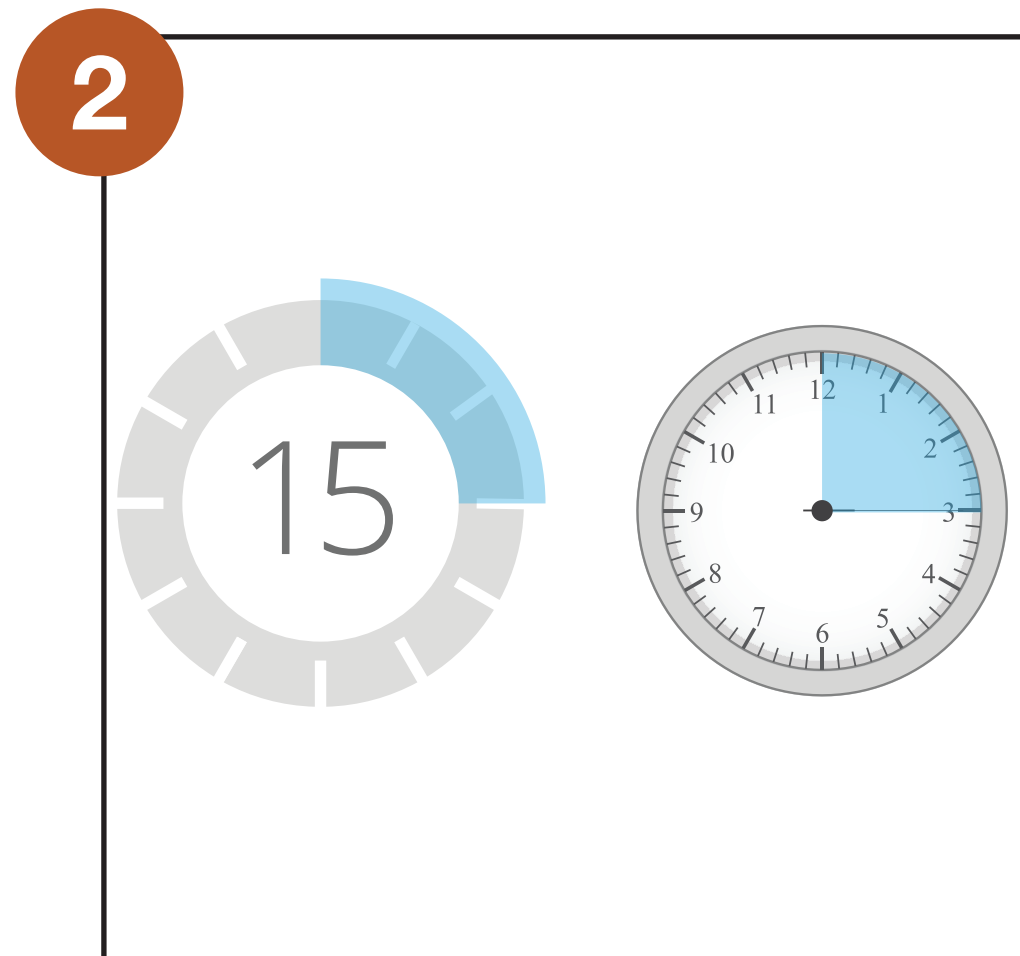

2. Attendez au moins 15 minutes, le temps de laisser chauffer le thermomètre.

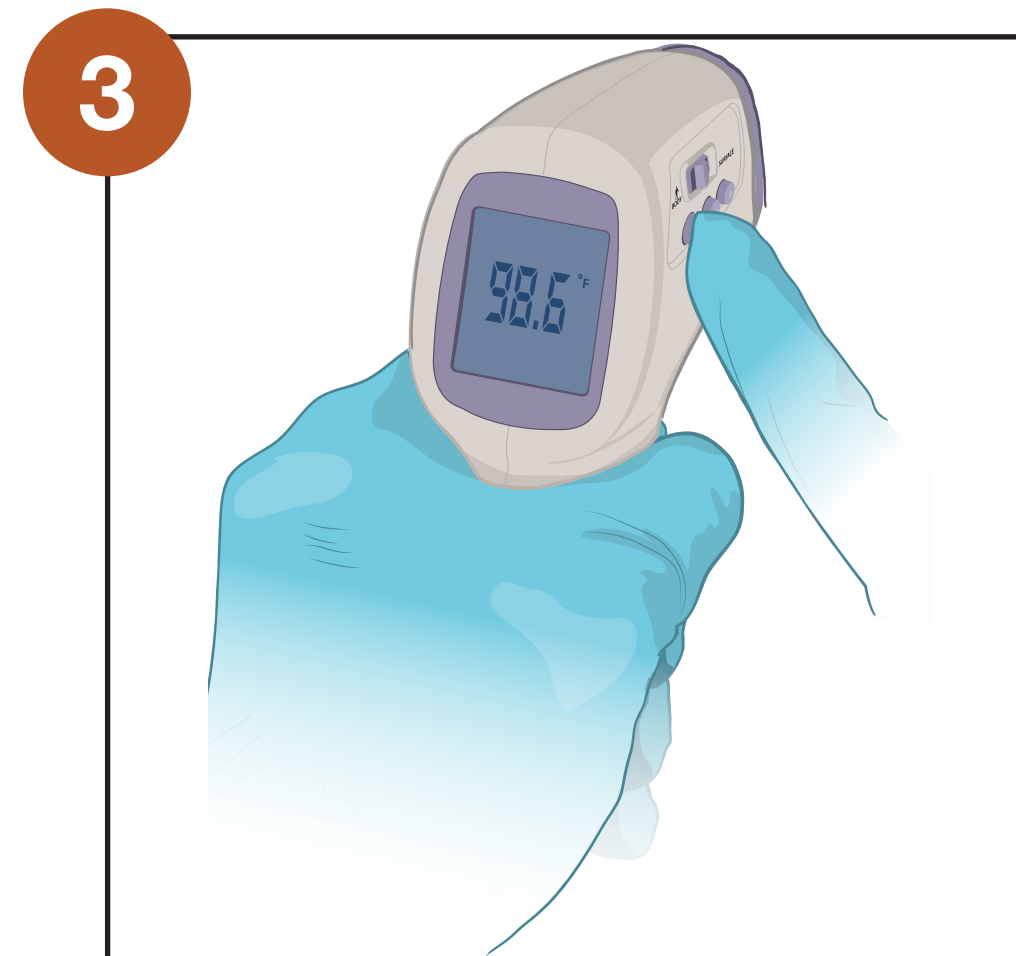


3. Appuyez sur le bouton pour mettre le thermomètre en mode Celsius (°C). Si le thermomètre dispose d'un mode « température corporelle », vérifiez que celui-ci est sur « température corporelle ».

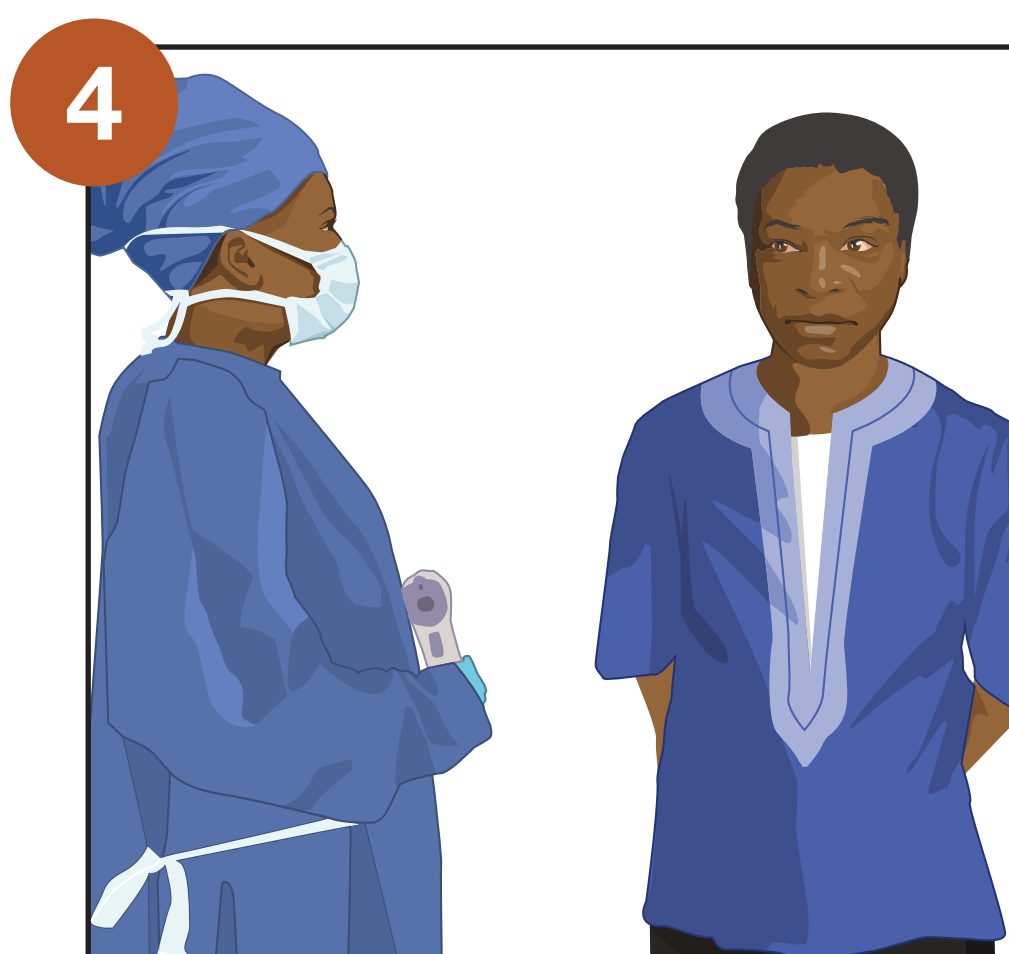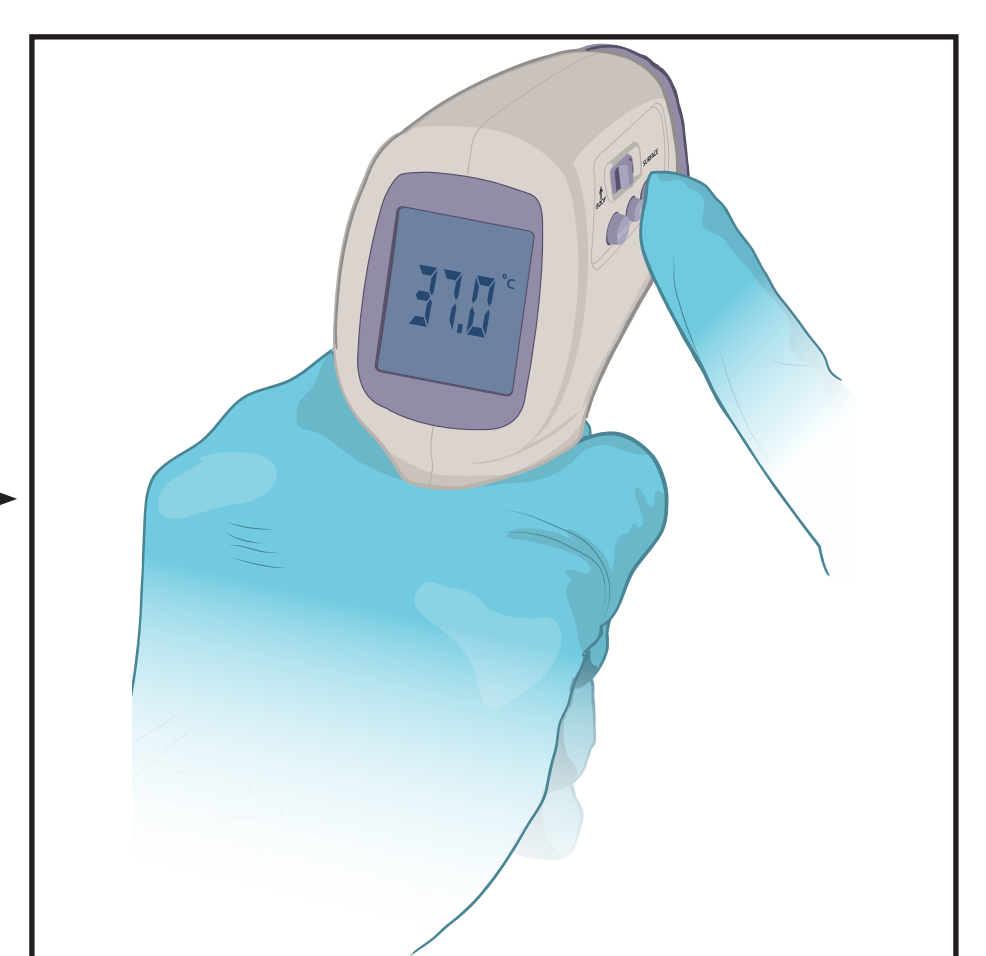

4. Mettez-vous sur le côté de la personne dont vous prenez la température. Reculez de quelques pas.


Ne vous placez pas en face de la personne.

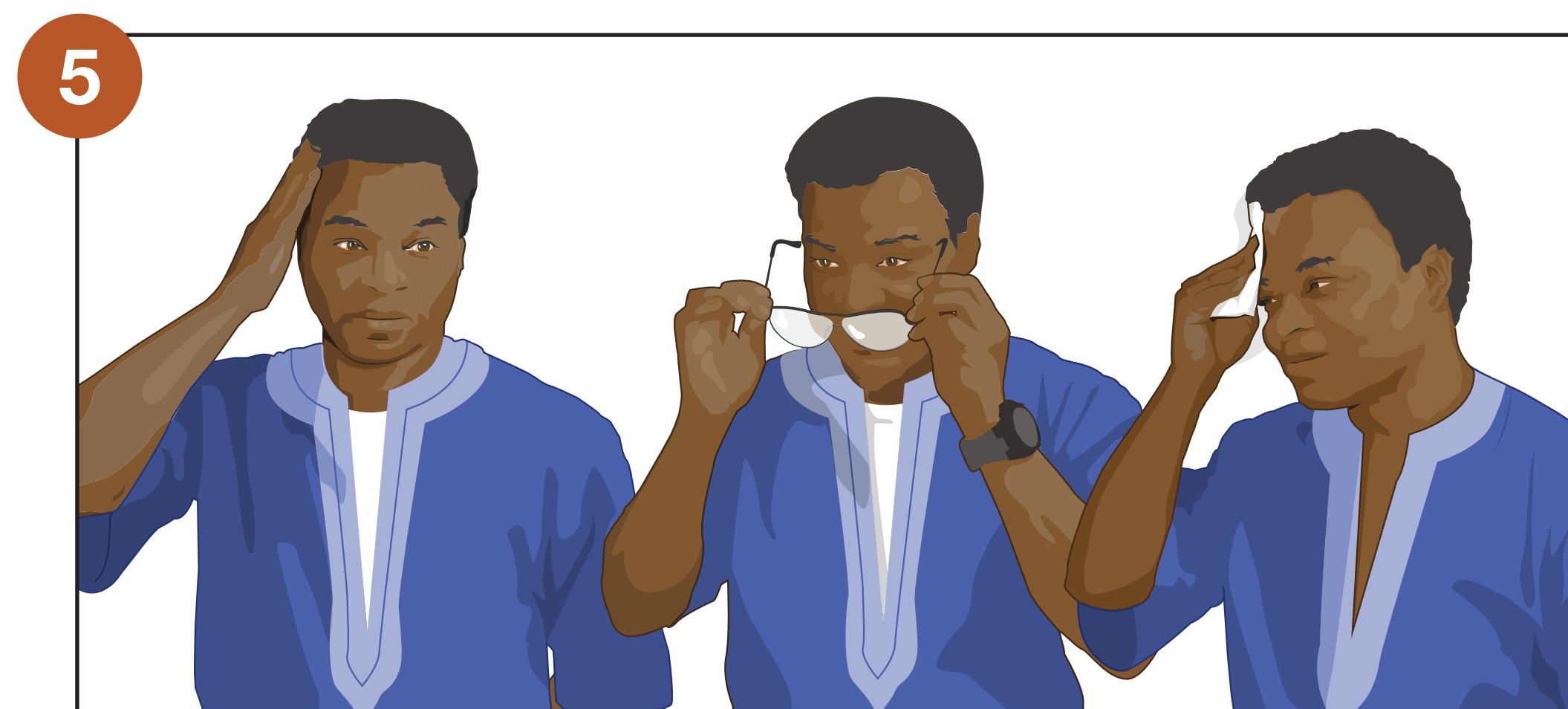

5. Demandez à la personne de:

- Garder les cheveux loin du visage.
- Retirer son chapeau ou ses lunettes.
- Essuyer sa transpiration.

Ces éléments pouvant fausser la mesure de la température.

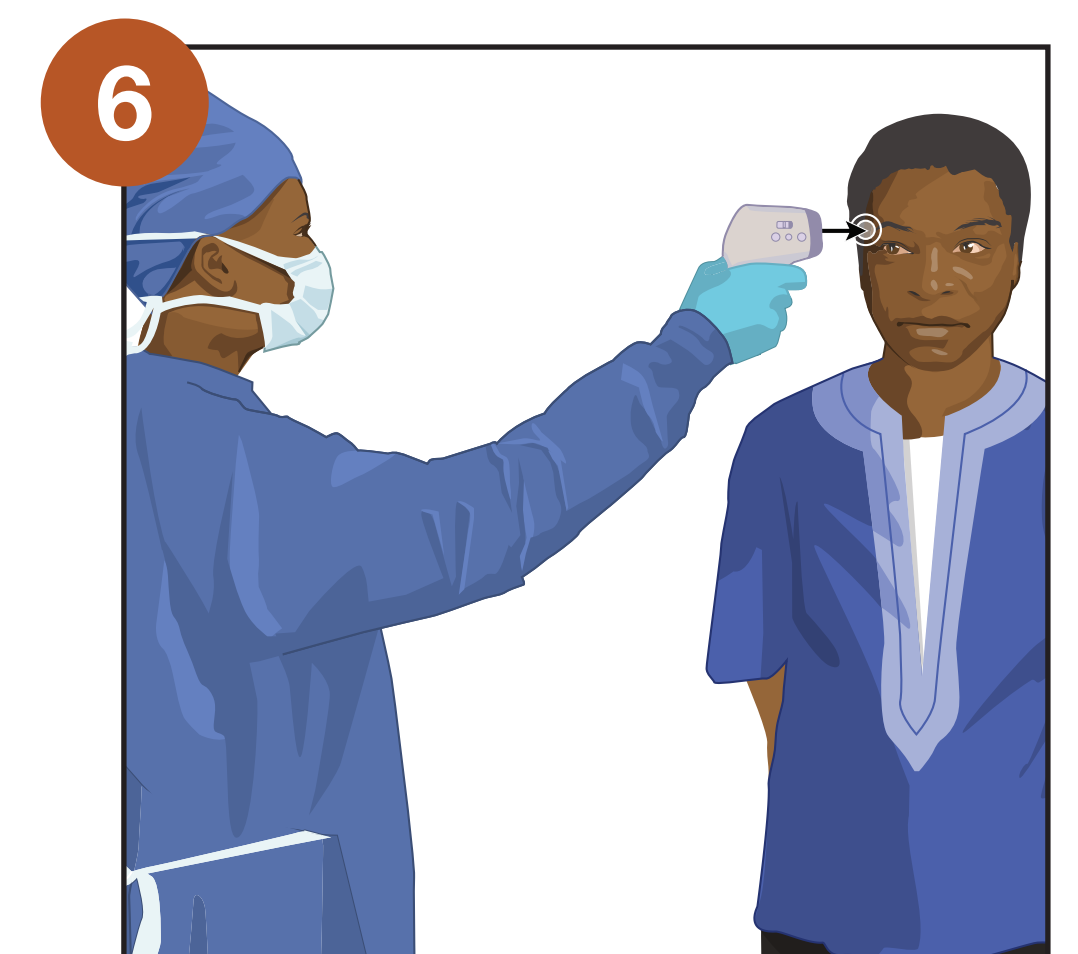


6. Dirigez le thermomètre vers l'extrémité du sourcil droit de la personne.




7. Tenez le thermomètre à une distance de la tempe de la personne équivalente à 3 doigts collés (3 à 5 cm).

Le thermomètre ne doit pas être en contact direct avec la peau.

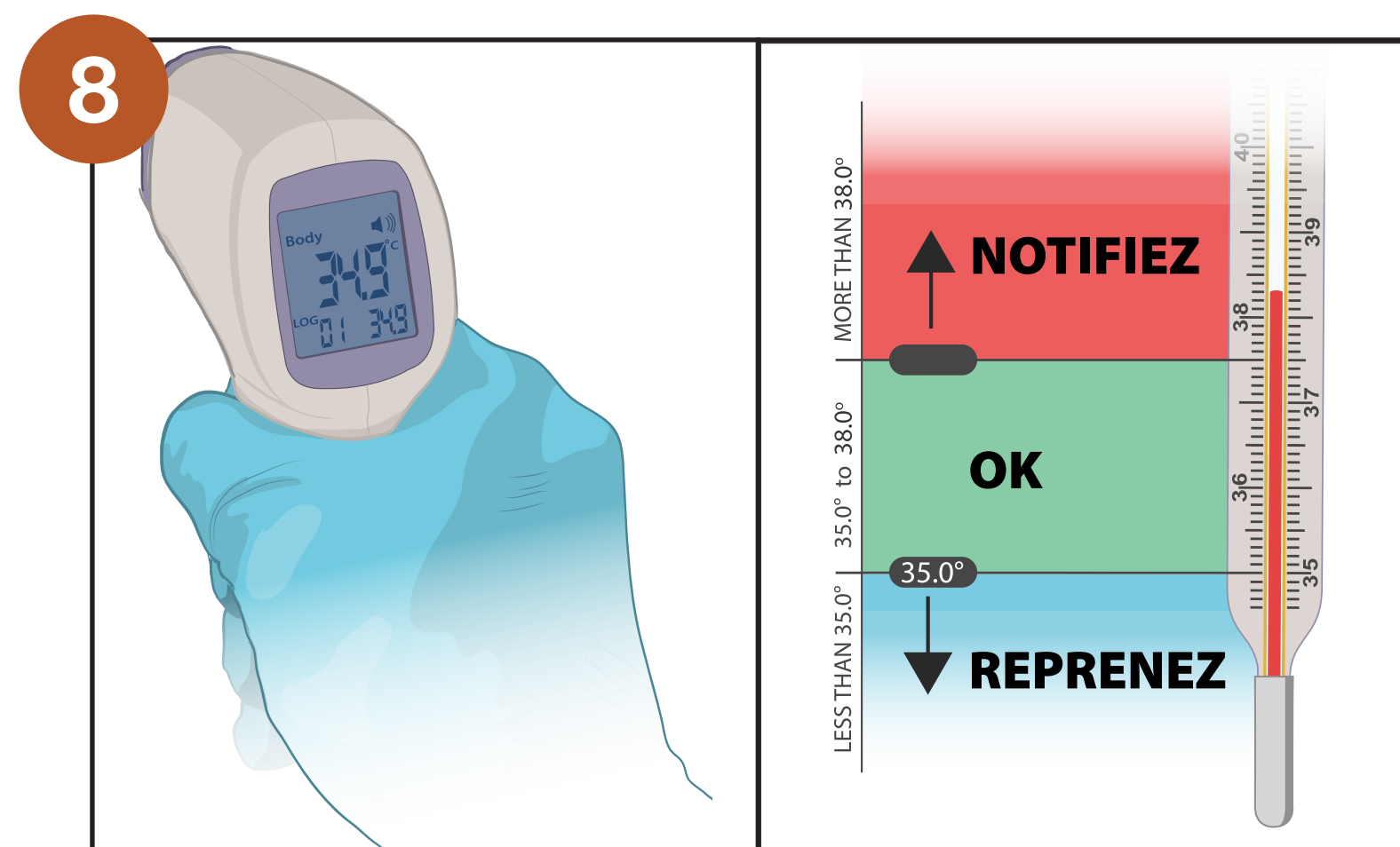

8. Maintenez le thermomètre dans cette position jusqu'au signal sonore. Lisez la température affichée à l'écran.

- Si la température est inférieure à 35 °C, reprenez la température.
- Si la température est supérieure ou égale à 38.0 °C, cette personne a de la fièvre.

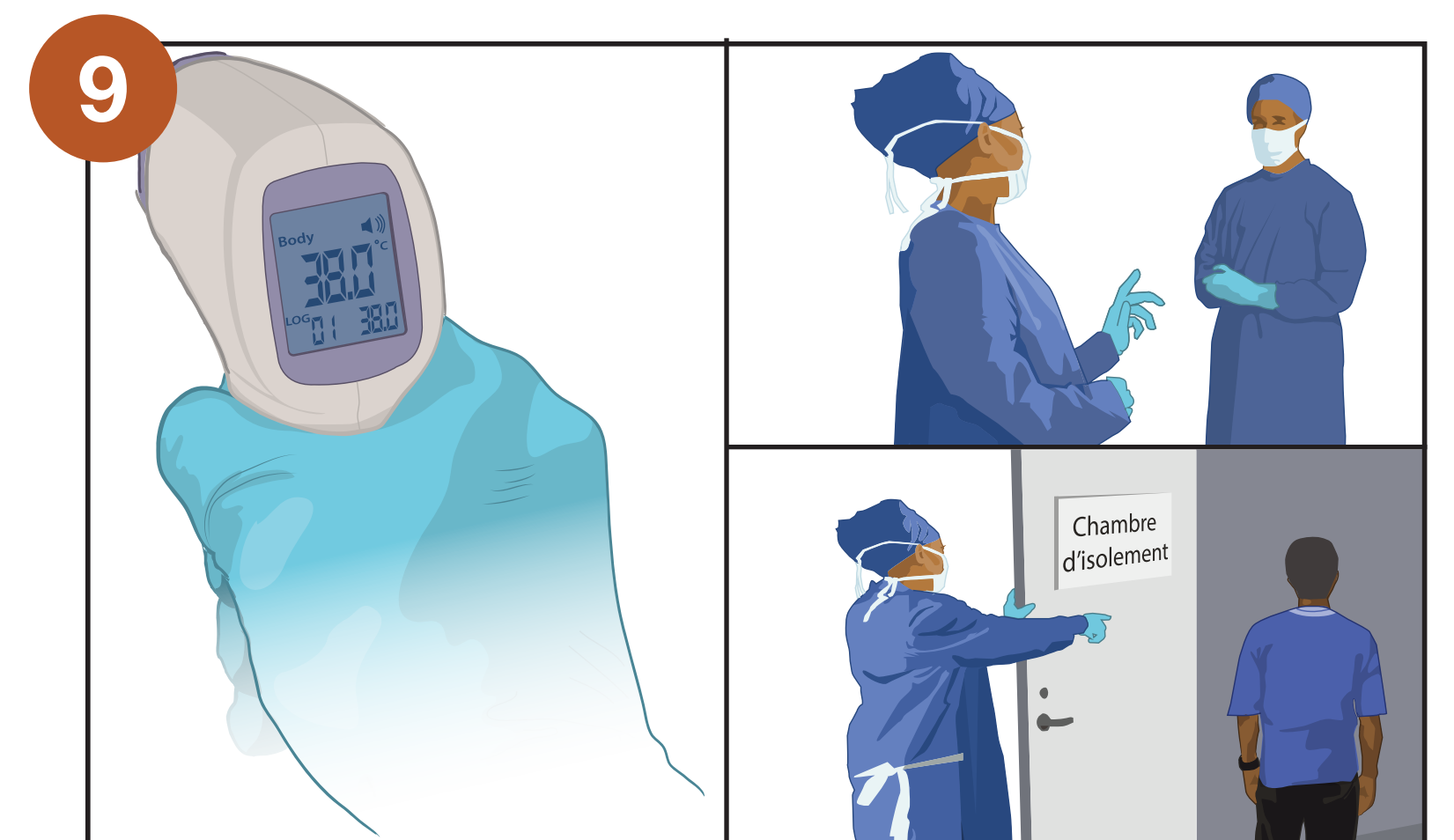


9. Si la personne répond à la définition d'un cas suspect, vous devriez:

- Informez votre superviseur
- Accompagnez la personne jusqu'à la zone d'isolement

**N'oubliez pas d'attendre 15 secondes entre chaque personne !
N'éteignez jamais l'appareil avant la fin de votre service !**


Entretien du Thermomètre

- **Changez fréquemment les piles.** La fréquence de remplacement des piles varie selon le modèle de thermomètre.
- Nettoyez la lentille.

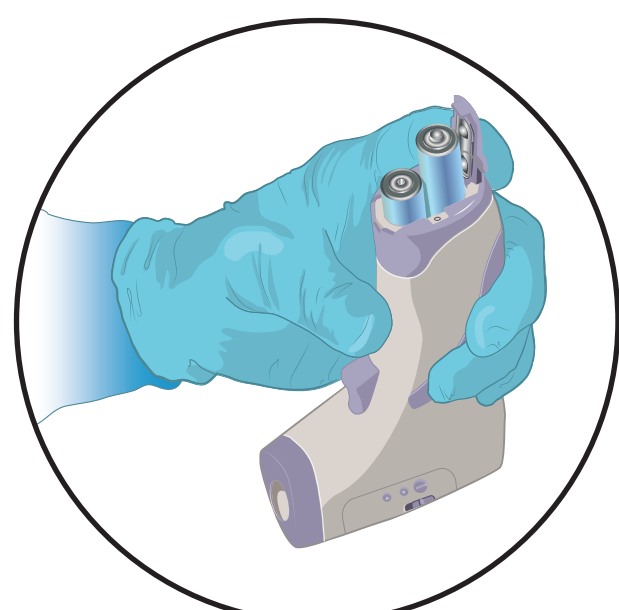


Apprenez à connaître les messages affichés sur l'écran :


- « Hi » signifie que la température est trop élevée (supérieure à 42.2 °C). Reprenez la température.

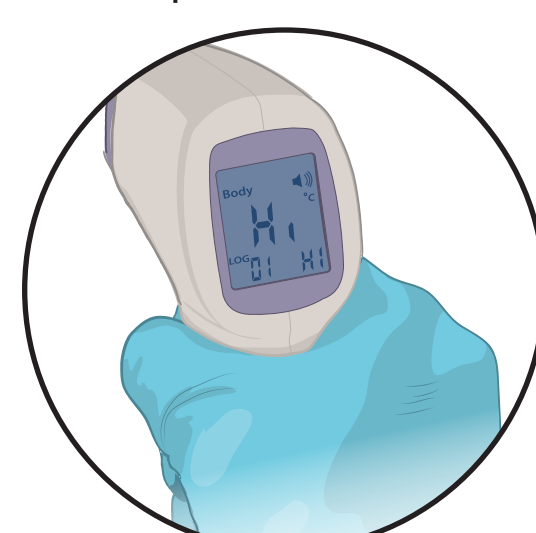

- « Lo » signifie que la température est trop faible (inférieure à 35 °C). Reprenez la température.

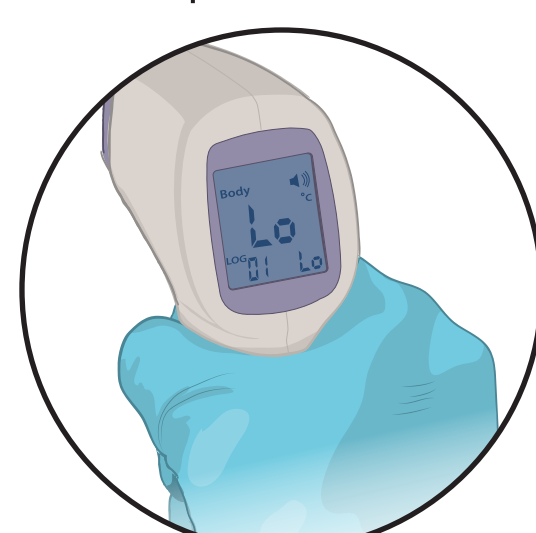

- « Err » signifie « erreur d'affichage ». Reprenez la température.

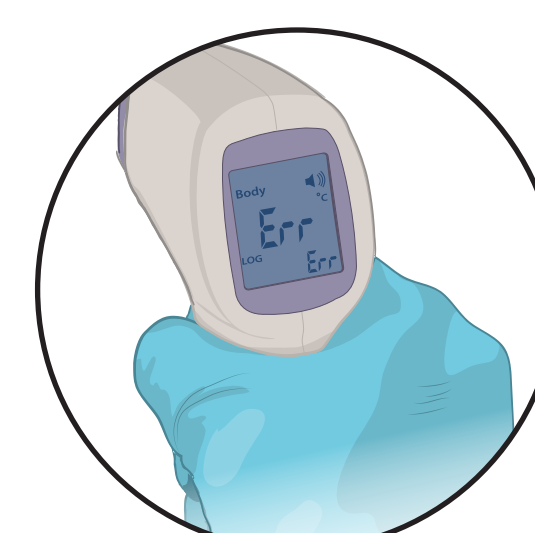

- Écran vide : Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Vérifiez que les piles sont neuves.

